



Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. Il permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

Caractéristiques

- Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH)
- Face extérieure imprimable en polyester
- Face intérieure non imprimée : coton 130gr/m²
- Certifié OEKO TEX 100 Class 1
- Fixation ajustable par liens en coton
- Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucune odeur, aucun produit chimique)
- Respirant et absorbant
- Matériau stérilisable
- Séchage rapide
- Disponible en 10 coloris standard et personnalisable

Disponible en 10 coloris



Dimensions

- Masque : 180 x 120 mm

Emballage

- Unitaire en sachet polypro transparent avec fermeture adhésive (3 gr)
- Conditionné en carton de 50 exemplaires (1,5 kg)

Recommandations

- Laver le masque avant la première utilisation
- Laver le masque pendant 30 minutes à 60°



Exemples de visuels personnalisés



Comment mettre et retirer le masque

Mettre le masque

- Avant de mettre le masque, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Repérer le haut du masque. Tenir le masque par les élastiques et l'adapter à chaque oreille. Tenir le masque de l'extérieur et passez les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.
- Ajuster le masque près du nez et du menton, sans toucher le devant du masque. Vérifier que le masque couvre bien le menton.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois qu'il est touché, l'utilisateur doit se laver les mains.

Retirer le masque

- Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.
- Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque.
- Eloigner le masque du visage et des vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque.
- Placer le masque à laver dans un contenant spécifique.
- Se laver les mains encore une fois.

Attention

L'utilisation d'un masque est une mesure de protection supplémentaire mais ne remplace pas les autres gestes barrières tels que :

- Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou avec une solution désinfectante à base d'alcool.
- Respecter la distanciation sociale recommandée.
- Utilisez un mouchoir à usage unique et tousser ou éternuer dans son coude.

Le lavage des mains - Comment ?

LAVER LES MAINS AU SAVON ET A L'EAU LORSQU'ELLES SONT VISIBLEMENT SOUILLEES
SINON, UTILISER LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'HYGIENE DES MAINS !



Durée de la procédure : 40-60 secondes




Mouiller les mains abondamment



Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :




Paume contre paume par mouvement de rotation,

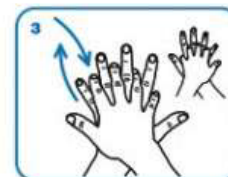


le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice versa,



les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,

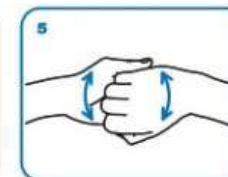

les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,

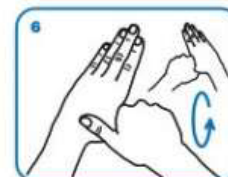

le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice versa,




la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice versa.




Rincer les mains à l'eau,



sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,

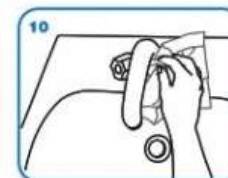

fermer le robinet à l'aide de la serviette.

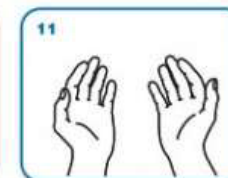

Les mains sont prêtes pour le soin.